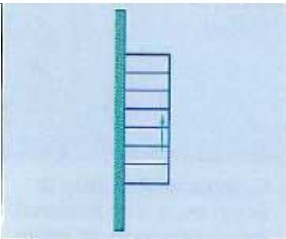
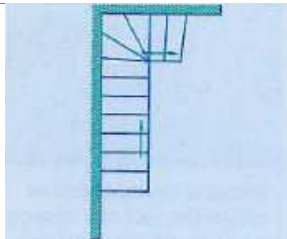
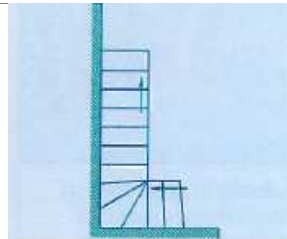
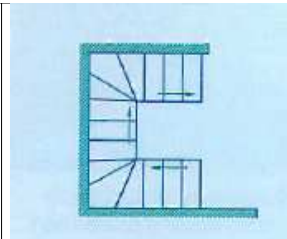
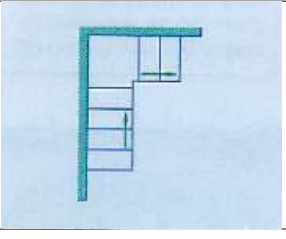
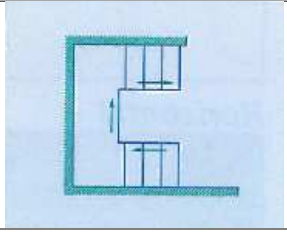
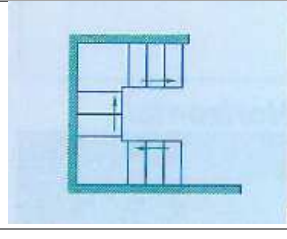
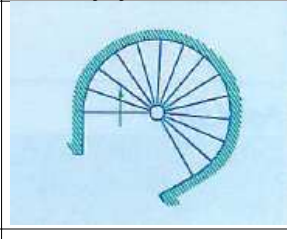



Informace o produktu, schod. křesla Freelift

Typy schodišť

Schodišťová křesla Freelift mohou být instalována prakticky na všechny typy schodišť. Nejobvyklejší typy schodišť jsou zobrazeny níže; avšak schodišťové křeslo může být také instalováno na schodištích, která se liší od těchto níže zobrazených.


			
A přímé schodiště	C schodiště s ohybem na horním konci	D schodiště s ohybem na dolním konci	E schodiště s dvěma ohyby
			
F schodiště s podestou v ohybu	G schodiště s širokou podestou	H schodiště s podestou mezi dvěma ohyby	W točité schodiště

Volné místo u paty schodiště:
min. 25 cm

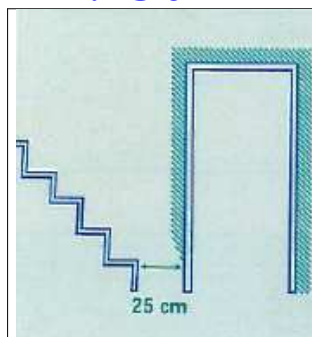

Vodicí kolejnice obvykle sahá za spodní konec schodiště, pokud je požadována vůle min. 25 cm. Pokud tam není tolik volného místa, může být instalována elektrická skládací kolejnice (viz zadní strana desek).

Požadovaná šířka
min. 69 cm

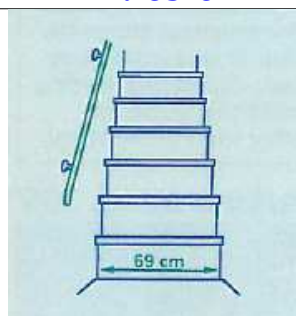

Nejužší místo schodiště musí mít volnou šířku min. 69 cm.




Důležité:


- Schodišťové křeslo může být obvykle instalováno na jakoukoli stranu schodiště.
- Zábradlí/madlo bude odstraněno na té straně schodiště, na které bude instalováno křeslo.
- Schodišťové křeslo je určeno pro transport jedné osoby do maximální hmotnosti 125 kg.

- 9 Ze stěny, ke které má být křeslo instalováno, nesmí vyčnívat žádné velké překážky. Máte-li pochybnosti, obraťte se na Výtahy VOTO.



Dostupné prodloužení vodicí kolejnice
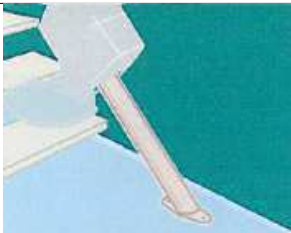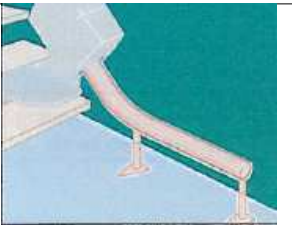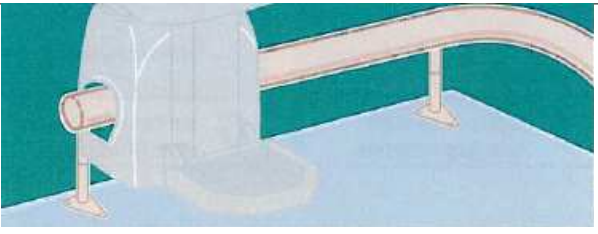
<i>U paty schodiště</i>		<i>Na horním konci schodiště</i>	
<i>Standard</i>	<i>Zkrácené</i>	<i>Standard</i>	<i>Nízké</i>
			
Vhodné v situacích, kdy je k dispozici pouze 45 cm volného místa u paty schodiště. Standardní pro všechny typy schodišť.	Vhodné v situacích, kdy je k dispozici pouze 25 až 45cm volného místa u paty schodiště.	Vhodné v situacích, kdy je možné vodicí kolejnici prodloužit o cca. 50 cm na podestě prvního podlaží. Standardní pro všechny typy schodišť.	Vhodné v situacích, kdy není k dispozici žádné volné místo pro prodloužení nebo je-li požadováno nízké vystoupení. Nožní opěra se zastaví na stejné úrovni jako podlaha podesty. Sedačku je možné otočit k usnadnění vystoupení osoby.
<i>Skládací</i>	<i>Horizontální</i>	<i>Horizontální</i>	
			
Vhodné v situacích, kdy je k dispozici méně než 25 cm volného místa u paty schodiště, např. jsou-li dveře umístěny bezprostředně vedle schodiště. Skládá a rozkládá se automaticky.	Ideální v situacích, kdy je dostatek volného místa u paty schodiště. Prodloužení umožňuje, aby sedačka mohla být zaparkována dále od schodů (čímž je zajištěna dodatečná šířka pro jiné osoby užívající schodiště).	Ideální v situacích, kdy je dostatek volného místa na horním konci schodiště. Prodloužení umožňuje, aby sedačka mohla být zaparkována dále od schodů (čímž je zajištěna dodatečná šířka pro jiné osoby užívající schodiště).	
<i>Parkovací ohyb, 90°</i>	<i>Parkovací ohyb, 180°</i>	<i>Parkovací ohyb, 90°</i>	

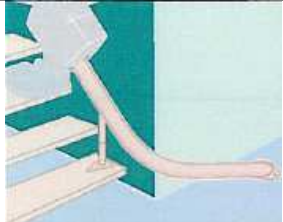		
Ideální pro zaparkování sedačky za rohem. Umožňuje, aby sedačka nebyla v zorném poli nebo aby nepřekážela u schodů.	Ideální například pro zaparkování sedačky pod schodištěm.	Ideální pro zaparkování sedačky „za rohem“. Umožňuje, aby sedačka nebyla v zorném poli nebo aby nepřekážela u schodů.

Nezávazné poskytování informací

Obchodní oddělení Výtahy VOTO ochotně odpoví na jakékoli dotazy , které vyplnou z těchto informací o produktu, aniž by tím pro tazatele vznikly jakékoli závazky (tel.: + 042 377 183 581 nebo navštivte www.vytahy-voto.cz). Naši pracovníci prodeje Vám vždy poskytnou odbornou radu a, budete-li si přát, jeden z našich poradců Vás navštíví, aby si prohlédl Vaše schodiště.



Výtahy VOTO Plzeň s.r.o.
Jateční 10
301 00 Plzeň

tel. : +420 377 183 581
fax.: +420 377 183 589
www.vytahy-voto.cz